

## BOHRTAN® AF

### Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi obrotowych antykorozyjny – bez fenoli – bez aldehydów

- Przeznaczenie:** Jednoczesne mycie i dezynfekcja narzędzi obrotowych ze stali, metali twardych, diamentów oraz do kamieni szlifierskich, narzędzi ściernych i polerujących (gumki silikonowe, płytki ceramiczne). Posiada właściwości antykorozyjne. Może być stosowany także do mycia i dezynfekcji elementów z tworzywa sztucznego. Specjalnie opracowana nowoczesna formuła oraz krótki czas działania sprawiają, że BOHRTAN® AF doskonale sprawdza się w myciu i dezynfekcji wiertel dentystycznych.
- Skład:** 100 g zawiera:  
N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,-3-diamina 0,38 g  
chlorek didecyldimetyloamonium 0,05 g  
inhibitory korozji, związki powierzchniowo czynne, związki kompleksujące, substancje zapachowe
- Spektrum działania:** Bakterie, M. terrae, M. avium, wirusy (łącznie z HBV, HCV, HIV, Vaccinia), grzyby i spory.
- Czas działania:** 15 minut
- Sposób użycia:** Zanieczyszczone narzędzia, bez mycia wstępnego, umieścić w nierozcieńczonym preparacie. Po dezynfekcji narzędzia dokładnie opłukać pod bieżącą, letnią wodą. Narzędzia nie pozostawiać w roztworze dłużej niż 24 godziny.
- Opakowanie:** butelka 1 l; kanister 5 l W celu dozowania należy odkręcić nakrętkę nad dozownikiem.
- Uwagi:** Opinie: Prof. Dr. Schubert, Frankfurt/M.; Prof. Dr. Wewalka, Wiedeń; Prof. Dr. Frösner, München; Prof. Dr. Werner, Schwerin; Dr J. Steinmann, Bremen.
- Stosować się do wskazówek producentów instrumentów.
  - Chronić przed dziećmi
  - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
  - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
  - Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
  - Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
  - Nie używać w połączeniu z innymi preparatami dezynfekującymi i myjącymi. Może to wpłynąć na poziom skuteczności lub tolerancji produktu.
  - Nie stosować do aluminium.
  - Działa szkodliwie po połknięciu
  - Ulega biodegradacji.

CE 0124

BOHRTAN® AF jest produkowany zgodnie z wytycznymi DGHM/VAH.  
Wyrób Medyczny zarejestrowany zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG.